

## WiViK Bildschirmtastatur

WiViK® ist eine Bildschirmtastatur von Prentke-Romich, die es Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen ermöglicht, auf einen PC mit Betriebssystem Windows 95/ 98/Me/NT4/00/XP zuzugreifen und beliebige Applikationen zu benutzen. Die WiViK-Bildschirmtastatur wird innerhalb eines Fensters angezeigt, das – wie jedes andere Fenster auch – in Größe und Position verändert werden kann.

### Ansteuerung mittels Zeigegerät

Die WiViK-Bildschirmtastatur kann mit beliebigen Zeigegeräten (Maus, Trackball, Touchpad, Headpointer, Tracker) bedient werden.


Die Tasten der WiViK-Bildschirmtastatur funktionieren genauso wie die Tasten einer realen Tastatur. Wählen Sie eine Taste z.B. durch Klicken aus, und das Zeichen erscheint in der gerade aktiven Anwendung. WiViK-Tastaturen können beliebige Zeichen enthalten und ganz nach Ihren Bedürfnissen auf dem Desktop positioniert werden. Mit den selbstvergrößernden Tastaturen bietet WiViK auch Menschen eine besondere Hilfestellung, die Probleme mit dem genauen Positionieren des Mauszeigers haben.



### Ansteuerung mittels Scanning

WiViK bietet die Möglichkeit, den Computer per Scanning über 1 – 6 extern an den PC angeschlossene Taste(n) zu steuern. Eine Auswahl bewegt sich dabei in einer einstellbaren Geschwindigkeit über die Bildschirmtastatur. Wird die externe Taste ausgelöst, schickt WiViK das gerade angezeigte Zeichen an die aktive Anwendung. Mittels WiViK lassen sich auch alle anderen Aktivitäten wie Menüs öffnen, Text editieren, Fenster vergrößern / verkleinern / verschieben / schießen / wechseln und Mauszeigeraktivitäten per Scanning ausführen.

WiViK bietet Ihnen nicht nur eine Reihe verschiedener Scanning-Varianten, Sie können auch Ihre eigene Scanstrategie entwickeln, abhängig von Ihren Vorlieben, motorischen Fähigkeiten und der Zahl der benutzten Tasten (1-6). Durch Wahl eines Auswahlverfahrens (Automatisch, Direkt, Invers / Schritt), eines Bewegungsmusters (Feld, Zeile/Spalte, Block) und der Zahl der verwendeten Tasten können Sie die für Sie optimale Scanstrategie kreieren und so Ihren PC schneller und effektiver mit WiViK steuern.

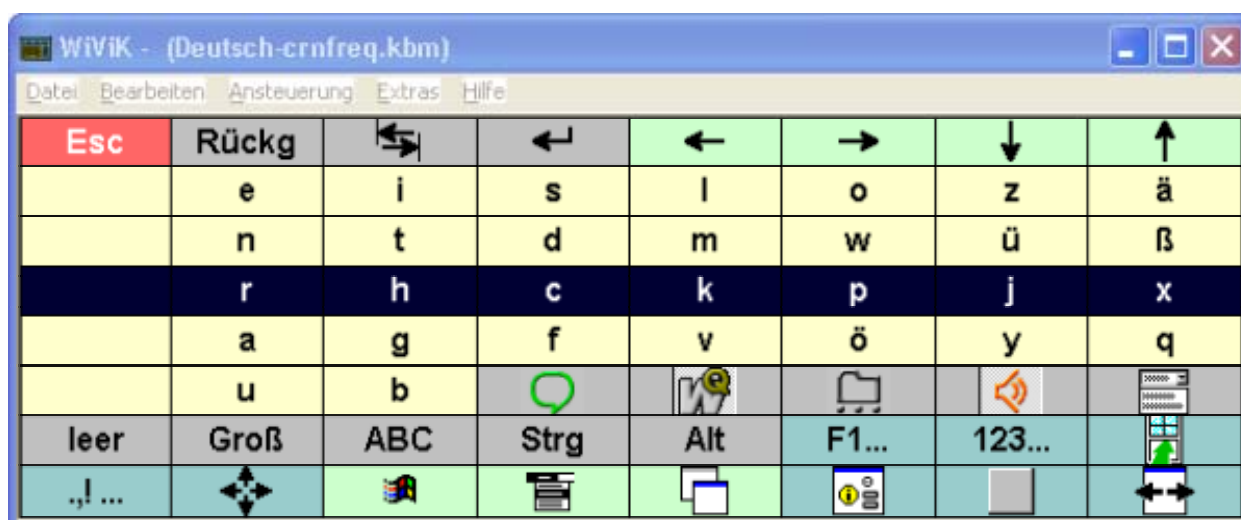

## Wortvorhersage und Auto-Text-Funktion

WiViK 3 beinhaltet die neue WordQ™ Wortvorhersage inklusive Auto-Text-Funktion und Vorhersage des nächsten Wortes, die Ihnen viel Arbeit bei der Texteingabe abnehmen kann. Die Wortvorhersage, die durch eigene Lexika hochgradig individualisiert werden kann, schlägt zur Eingabe passende Wörter vor, die per Auswahl übernommen werden können. Beginnen Sie mit dem Schreiben eines neuen Wortes. Sobald es in einem Vorschlagsfeld der Wortvorhersage erscheint, wählen Sie es aus und WiViK schreibt das Wort automatisch für Sie zu Ende. Die Auto-Text-Funktion erlaubt Ihnen, Ihre eigenen Textkürzel für beliebige Ausdrücke zu definieren. Sobald Sie ein solches eingeben, wird es von WiViK automatisch durch den dazu gespeicherten Text ersetzt. Wortvorhersage und Auto-Text-Funktion helfen, die Zahl der nötigen Eingaben zu reduzieren, wodurch sich die Schreibgeschwindigkeit deutlich erhöht.



## Sprachausgabe

Um Ihnen bei der Eingabe von Texten zu helfen besteht die Möglichkeit, Buchstaben, Wörter und ganze Sätze automatisch vom Computer während der Eingabe sprechen zu lassen. Durch dieses auditive Feedback können Sie sich besser auf das Schreiben konzentrieren und müssen Ihre Eingaben weniger oft überprüfen.